



## Instrukcja złożenia przyłbicy medycznej

1

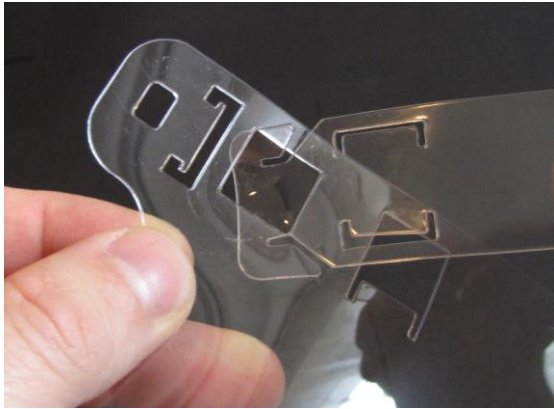


Przepchnąć "na ukos" koniec paska przez otwór

2

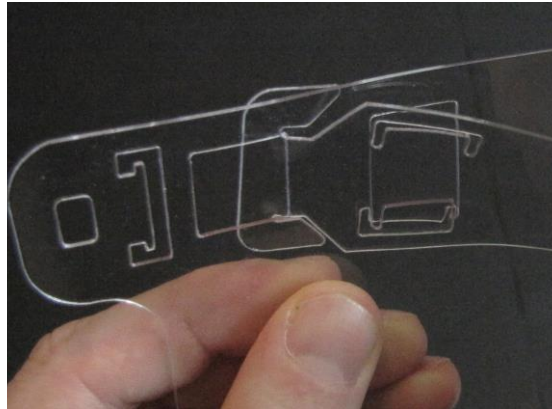

Zacześć skrzydełka paska za dolną krawędź...

3

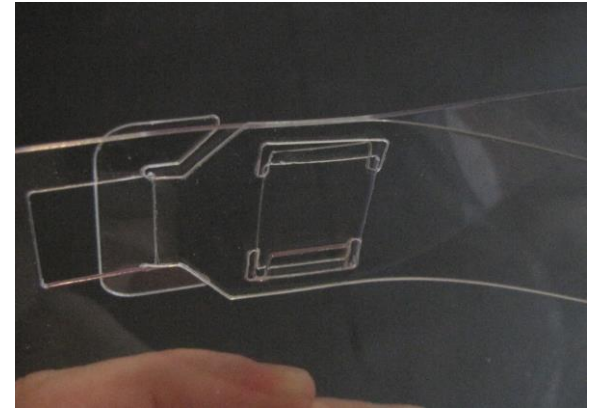


...a potem za górną krawędź otworu

4



Powtórzyć po drugiej stronie wyginając plastik

5

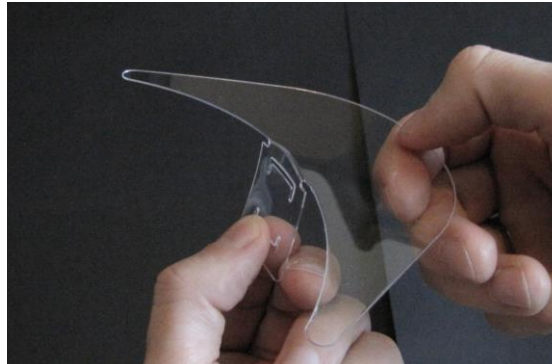


Wygiąć zaczep daszka o 90 stopni

6



Zacześć daszek od zewnątrz (nie od czoła)

7

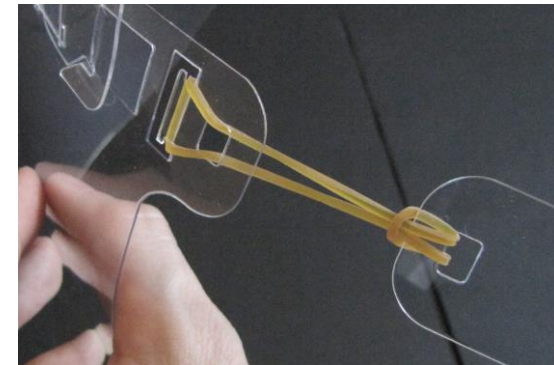

Gumkę owiać, przewlec przez otwór i zacześć

8



Gotowa przyłbica

9



Po założeniu